








## Déblocage des Bacs

### Vet ABC de SCIL

1. Connectez-vous au système en tant que ADMIN (Mot de passe : SCIL)
2. Sélectionnez le menu Maintenance 
3. Sélectionnez Serv. Tab dans le haut
4. Sélectionnez le menu service à la clientèle 
5. Sélectionnez vidange des bacs et appuyez sur démarrer cycle 
6. Ouvrez la porte avant
7. Mettez 3 ml 50/50 Eau de javel/eau distillée dans chacun des bacs
8. Fermez la porte
9. Sélectionnez Débouchage et appuyez sur démarrer cycle pour faire démarrer le débouchage 
10. Répétez cette opération 10 fois
11. Sélectionnez vidange bacs et appuyez sur démarrer cycle 
12. Appuyez sur Status dans le coin supérieur droit de l'écran 
13. Appuyez sur Start Up 
14. Effectuez un contrôle de qualité
15. Envoyez les résultats par télécopieur au 1-705-726-9202 si le contrôle ne passe pas. Veuillez indiquer le nom de la clinique et votre nom.