

ICÔNES

Menu



Identification des échantillons – Entrez les données pour effectuer une analyse



QC – (données sur les contrôles de qualité, calibrage)



Historique des résultats – Jusqu'à 1000 résultats interrogeables enregistrés



Maintenance – (Réactifs, archive, statistiques, logs, service)



Status – Affiche toutes les alarmes, faites un cycle de démarrage à partir de cet écran



Quitter – Changer d'utilisateur, redémarrage ou arrêt de l'appareil



Aide contextuelle – Fournit de l'aide avec l'écran affiché

ICÔNES du Vet ABC Plus de Scil

Actions



Cycle de démarrage – Enclenche un cycle de démarrage



Arrêt – Met l'appareil en arrêt



Redémarrer – Redémarre l'appareil



Déconnexion – Ferme la session de l'utilisateur en ligne et affiche l'écran d'ouverture de session



Modifier – Permet à l'utilisateur de faire des changements dans l'écran affiché



OK – Valide une action



Annuler – Annule une action



Réinitialiser – Supprime l'information saisie dans un champ ou annule le besoin d'archiver



Supprimer – Efface l'item sélectionné



Précédent – Ramène à l'écran précédemment affiché



Afficher – Affiche de l'information supplémentaire

ICÔNES du Vet ABC Plus de Scil



Imprimer – Force l'appareil à imprimer l'affichage actuel



Envoyer – Envoie des données à l'ordinateur



Espèces – Permet à l'utilisateur de changer l'espèce



OK – Confirme une action



ANNULER – Annule une action



Arrêt d'urgence – Interrompt un cycle en cours



Nouvel util. – utilise pour créer un nouvel utilisateur dans le menu de réglages



Clavier virtuel – Ouvre le clavier virtuel



Valider – Valide l'entrée au clavier et passe au champ suivant



Fermer – Ferme le clavier une fois toutes les entrées complétées

ICÔNES du Vet ABC Plus de Scil

Contrôle de qualité



Importation QC – utilisé pour importer les valeurs cibles des contrôles



Historique des contrôles – Montre l’historique des contrôles sauvegardés dans l’appareil



QC Périmé – Les données sur les contrôles sont expirées



Limite de temps Inter QC – L’appareil s’attend à ce qu’un contrôle soit fait



QC invalide – Certains des paramètres du dernier contrôle sont en dehors des limites



QC réussi – Tous les paramètres sont dans les limites



QC – affiché quand le bon no. de lot des contrôles est entré dans identification échantillon



Création Calibration - utilisé pour calibrer l’appareil, ouvre le menu

ICÔNES du Vet ABC Plus de Scil

Réactifs



Remplacer – Utilisé pour remplacer les réactifs



Amorcer – Utilisé pour injecter des réactifs dans l'appareil



Démarrer cycle – Enclenche le cycle désiré

Service



Configuration – (Date, heure, imprimante, réseau, espèce, alarmes)



Services clientèle – (Injection, nettoyage, nettoyage concentrate, vidage des chambres)



Cycles mécaniques – (aiguille, chariot, valves, etc.)

ARCHIVE



Complète – Archive toutes les données présentes dans l'appareil



Incrémentielle – Archive les informations des 30 derniers jours



Restaurer – Les réglages d'une ancienne configuration peuvent être restaurés